



H₂S RAPID TEST

CODE 88013

Test rapido per la produzione di idrogeno solforato (H₂S).
Rapid test for hydrogen sulfide (H₂S) production.

MODALITA' D'USO INSTRUCTION FOR USE

<ul style="list-style-type: none">• Prelevare una provetta dal kit.• Aggiungere 0.3 ml di soluzione fisiologica sterile.• Stemperare con un'ansa sterile una colonia ben isolata da terreno di coltura.• Aggiungere 2-3 gocce di olio di vaselina sterile• Tappare ed incubare la provetta in termostato a 37°C per 4 ore fino ad un massimo di 24 ore.• Interpretare i risultati servendosi della tabella delle reazioni.	<ul style="list-style-type: none">• <i>Take a tube from the kit.</i>• <i>Add 0.3 ml of sterile physiological solution.</i>• <i>Suspend with sterile loop a well isolated colony from culture medium.</i>• <i>Add 2-3 drops of sterile vaseline oil</i>• <i>Cover the tube and incubate at 37°C for 4 hours till to 24 hours.</i>• <i>Interprete the results by referring to reactions table.</i>
---	---

TABELLA DELLE REAZIONI REACTIONS TABLE

Precipitato Nero <i>Black precipitate</i>	TEST POSITIVO <i>POSITIVE TEST</i>
Incolore <i>Colorless</i>	TEST NEGATIVO <i>NEGATIVE TEST</i>

CONTENUTO DEL KIT: 30 Provette	CONTENT OF THE KIT: 30 Tubes
CONSERVAZIONE: 5-12 °C	STORE AT : 5-12 °C
VALIDITA': 1 anno	SHELF LIFE: 1 year

BIBLIOGRAPHY

1. Belliveau R.R., Grayson J.W. and Butler T.J.: Simple method of identifying Enterobacteriaceae . Am . J. Clin. Pathol . 50:126 – 128, 1968.



Liofilchem s.r.l. Bacteriology products.

64026 ROSETO D. A. (TE)-ITALY Phone 085 / 8930745 – Fax 085 / 8930330