

AEROSEPT AF



Appareil de
désinfection par
voie aérienne



- Générateur d'aérosol entièrement automatique
- Process AEROSEPT AF/ ASEPTANIOS AF 310 validé : efficacité prouvée
- Précision de diffusion par le réglage du débit réel et de la concentration souhaitée.
- Paramétrage des données en Français, anglais et espagnol.
- Démarrage différé jusqu'à 9H, après programmation.

INDICATION

Générateur d'aérosol autonome, mobile et entièrement automatique destiné à la désinfection des surfaces et dispositifs médicaux préalablement nettoyés.

Utilisation avec le produit de désinfection ASEPTANIOS AF 310.

FIABILITE

Aspiration automatique du produit désinfectant.
Buse ultra-sonique en acier inoxydable.
Compresseur étanche entièrement conçu en TEFLON.
Pompe péristaltique à débit constant (précision : 1%).
Appareil monocoque en polyéthylène.

AEROSEPT AF

Appareil de désinfection par voie aérienne

SECURITE

- Temporisation programmable permettant la sortie de l'utilisateur avant démarrage du programme (utilisation de produits Hors Présence Humaine).
- Formes et dimensions ergonomiques : socle arrondi pour une meilleure protection contre les chocs.
- Programmeur électronique automatique : seul le cubage de la salle à traiter est à indiquer (le temps de diffusion est calculé automatiquement).

SIMPLICITE

Fonctionnement séquentiel entièrement automatisé :

- Aspiration du produit désinfectant et régulation du débit par la pompe péristaltique,
- Production d'air comprimé,
- Production simultanée de l'aérosol au niveau de la buse,
- Arrêt automatique de l'appareil en fin de programme,
- Auto-nettoyage de la buse...

Possibilité de programmer d'avance deux volumes de salles.

Simplicité de mise en marche : Incrémentation du volume puis «Start».

MODE D'EMPLOI

- Afficher le volume de la salle ou sélectionner la salle à traiter A ou B (préalablement programmée)
- Appuyer sur «START» : la temporisation pré-programmée s'enclenche pour vous permettre de quitter la salle avant l'aérosolisation.
- Le produit est aspiré automatiquement.
- A la fin du temps de diffusion, l'appareil s'arrête.
- Respecter le temps de contact nécessaire à l'activité recherchée (voir instructions liées au produit utilisé)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- | | |
|--|---|
| - Volume maximal à traiter : 400 m3 | - Poids à vide : 30 kg |
| - Débit moyen : 6,6 l/h | - Dimensions : 760 H x 430 L x 690 P (mm) |
| - Compresseur étanche à membrane. | - Alimentation : 220 V – 50 Hz |
| - Capacité de la réserve : bidon de 5 litres | - Puissance : 600 VA |

REFERENCES

AEROSEPT AF417.017

Produits adaptés (4 x 5 litres) :

ASEPTANIOS AF 310.....1852.034

