



BD SafetyGlide™

Aiguilles de sécurité, avec système d'assistance d'activation Activation-Assist™

Stérile, usage unique

Indications :

Pour l'injection en sous-cutané, intra-musculaire ou intra-veineux d'antibiotiques, analgésiques, antiémétiques, fer, vitamines...

Composition des différents éléments :

- Capuchon protecteur de l'aiguille : polypropylène (PP)
- Aiguille : acier inoxydable Type 304 (18-20% Chrome ; 8-12% Nickel ; 2% de Manganèse ; 1% de Silicone)
- Embase : polypropylène (PP)
- Fixation aiguille sur embase : résine époxy
- Dispositif de sécurité : polypropylène (PP)
- Lubrifiant : silicone de qualité médicale
- Emballage individuel : Polyamide



Classe IIa

selon la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

Marquage CE :

Selon la directive européenne 93/42 CEE (procédure de conformité annexe II)

• Certificat : n°Q252.232 ; Certifié par NSAI (n°0050)

Fabricant :

Becton Dickinson Singapour pour Becton Dickinson Franklin Lakes, NJ, USA

• Certification : EN ISO 9001 : 2000 et EN ISO 13485 : 2003 (EN 46001); Certificat n° CM 19.2305 ; Certifié par NSAI (n°0050)

• Stérilisation : radiation (Gamma)

• Péremption : 5 ans après stérilisation

Certifié :

- Sans Latex
- Sans DEHP

BD SafetyGlide™

Aiguilles de sécurité, avec système d'assistance d'activation Activation-Assist™
Sterile, usage unique, sans latex

Caractéristiques Générales :

L'aiguille de sécurité BD SafetyGlide™ permet l'injection en intra-veineux, intradermique ou en sous-cutanée en toute sécurité et est **compatible avec des seringues Luer Simple et Luer Lock**.

L'aiguille souillée peut être recouverte uni manuellement, immédiatement après avoir dépiqué, en appuyant d'un doigt sur le dispositif de sécurité jusqu'à l'obtention d'un " clic " sonore.

Le système d'assistance Activation-Assist™ garantit l'activation complète du système de sécurité. Le verrouillage de la sécurité est alors irréversible.

Le dispositif de sécurité est aligné au biseau afin de faciliter l'orientation du biseau ainsi qu'autoriser les injections à angle fermé.

L'aiguille de sécurité BD SafetyGlide™ correspond aux critères de sécurité définis par le GERES :

Une sécurité **intégrée au dispositif**

Une mise en sécurité la **plus précoce** par rapport au geste

Une activation **uni manuelle, irréversible**, avec un **indicateur de mise en sécurité sonore et visuel**

La technique d'injection avec l'aiguille de sécurité BD SafetyGlide™ ne nécessite qu'un changement minimal du geste d'injection comparé à une aiguille hypodermique classique, non sécurisée.

Références	Code	Aiguille	
	couleur	Gauge	Longueur en mm
305918	Rose	18	40
305917	Vert	21	40
305915	Vert	21	25
305900	Noir	22	40
305902	Bleu	23	25
305916	Orange	25	25
305901	Orange	25	16
305921	Gris	27	16

Conditionnement :

50/ boîte - 500 / carton



BD Medical
Medical Surgical Systems
11, rue Aristide-Bergès
38800 Le Pont-de-Claix
Tél. 04 76 68 36 36
Fax 04 76 68 55 61
www.bd.com/france